

Registre su medidor para obtener ayuda y asistencia técnica: OneTouch.es/bienvenido



Guía rápida de uso

Sistema para la Monitorización de Glucosa en Sangre
OneTouch Select Plus Flex®

Utilice esta guía para conocer su medidor y siga los pasos indicados para comenzar a utilizarlo.



⚠ IMPORTANTE: Lea el Manual del usuario que se incluye junto con el sistema.



AW 06989604A

ONETOUCH®

1

Configurar la hora y la fecha en el medidor

Encienda el medidor

Mantenga pulsado **OK** hasta que aparezca la pantalla inicial.

Utilice los botones **↓** **↑** para editar cada ajuste y pulse **OK** para confirmar.




Configure la hora en la primera pantalla SET.

- > La **hora** parpadeará. Pulse **OK** si los datos son correctos o cámbielos y confirme.
- > Los **minutos** parpadearán. Pulse **OK** si los datos son correctos o cámbielos y confirme.



Configure la fecha en la siguiente pantalla SET.

- > El **año** parpadeará. Pulse **OK** si los datos son correctos o cámbielos y confirme.
- > El **mes** parpadeará. Pulse **OK** si los datos son correctos o cámbielos y confirme.
- > El **día** parpadeará. Pulse **OK** si los datos son correctos o cámbielos y confirme.

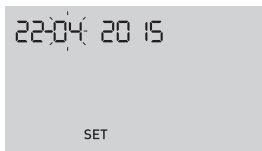

Ya está listo para realizar un análisis.

La configuración del medidor ha finalizado cuando aparece la pantalla con 3 guiones.




2

Realizar un análisis

Barras de contacto




Puerto para la tira reactiva

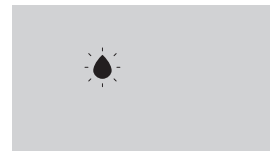


Aparecerá el icono de la gota de sangre parpadeando.

Introduzca una tira reactiva en el puerto para tiras reactivas con las barras de contacto mirando hacia usted.

Canal estrecho

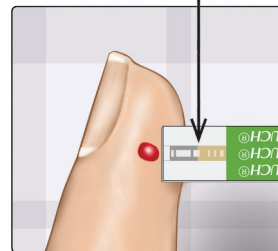

Ventana de confirmación completa

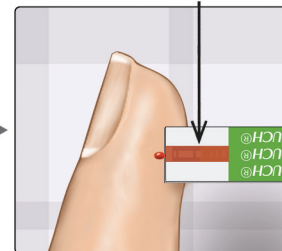

Coloque la tira reactiva junto a la gota de sangre de forma que el canal estrecho situado en el borde de la tira reactiva toque ligeramente la gota de sangre.

La gota de sangre penetrará en el canal estrecho, haciendo que la ventana de confirmación se llene por completo.

3

Visualizar sus resultados



Ejemplo de un resultado dentro del intervalo objetivo

Sus resultados se muestran en la pantalla. La flecha indicadora del intervalo señala a la barra de color azul, verde o roja para indicar que el resultado está por debajo, dentro o por encima de los límites del intervalo objetivo.



Ejemplo de resultado por debajo del intervalo objetivo



Ejemplo de resultado por encima del intervalo objetivo

4


Opcional: Conectarse a un dispositivo móvil

Su medidor incluye la tecnología **Bluetooth®**. Esto permite enviar sus resultados de forma inalámbrica a un dispositivo móvil, como un teléfono o tablet, donde podrá visualizarlos y registrarlos en gráficos.


Para obtener más información acerca del uso de la función inalámbrica del medidor y ver una lista completa de dispositivos y aplicaciones de software compatibles, visítenos en www.OneTouch.es.

Conectar el medidor

Pulse **OK** y **▲** al mismo tiempo para activar y desactivar la función **Bluetooth®**. Cuando el dispositivo móvil se lo indique, introduzca en el dispositivo el PIN que se muestra en el medidor.

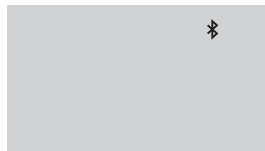

El símbolo significa que la función **Bluetooth®** está activada.

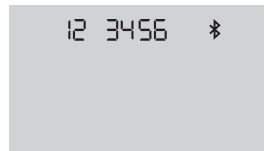


Ejemplo de número PIN.

Símbolos del medidor


	Encendido del medidor		Bluetooth® activado
	Pila baja		Modo histórico (resultados anteriores)
	Pila agotada		Aplicar la muestra
	Solución control		Flecha indicadora del intervalo objetivo
	Sincronizando	SET	Modo de ajuste

Acerca del indicador del intervalo objetivo

El medidor incluye un indicador del intervalo objetivo que le permite saber automáticamente si su resultado está por debajo, por encima o dentro de sus límites del intervalo objetivo. Los límites alto y bajo utilizados en el indicador del intervalo objetivo están preconfigurados de la siguiente manera:

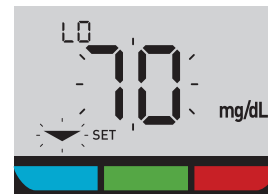

Límite bajo preconfigurado

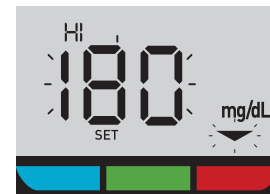

Límite alto preconfigurado

Para obtener más información sobre cómo cambiar los límites preconfigurados para que se ajusten a sus necesidades, consulte el Manual del usuario.

El nombre de la marca **Bluetooth®** y sus logotipos son marcas comerciales registradas que son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de LifeScan Europe se encuentra amparado por una licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.



OneTouch®
Fecha de rev.: 03/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 06989604A



Por favor, póngase en contacto con nuestra Línea de Atención Personal OneTouch® llamando al teléfono gratuito 900 100 228. Horario de atención telefónica, laborables de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h.

Lifescan

