

Utilice esta guía para conocer su medidor y siga los pasos indicados para comenzar a utilizarlo.

IMPORTANTE: Lea el Manual del usuario que se incluye junto con el sistema.

Iconos del medidor

	Bluetooth® activado
	Sincronizando
	Resultado con solución control
	Pila baja
	Puntos de progreso de navegación por la pantalla

Consulte en el Manual del usuario los símbolos e iconos del medidor y sus significados.

Por favor, póngase en contacto con nuestra Línea de Atención Personal OneTouch® llamando al teléfono gratuito 900 100 228. Horario de atención telefónica, laborables de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h.

LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug
Switzerland



LifeScan Deutschland GmbH
Niederlasser Lohweg 18
40547 Duesseldorf, Germany



LifeScan

OneTouch®
AW 07198502A
© 2018-2023 LifeScan
IP Holdings, LLC
Fecha Rev.: 03/2023



1 Configurar el medidor

Encender el medidor

Mantenga pulsado hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

Use los botones o para editar cada ajuste y pulse para confirmar.

Configurar el idioma

Resalte el idioma que desee y pulse .

Opcional: Realice la configuración utilizando la App Móvil OneTouch Reveal®*

Seleccione **Sí** para que la app le guíe por la configuración.




Descargue la App Móvil OneTouch Reveal® antes de emparejar el medidor y el dispositivo móvil.



Configurar hora

Pulse si la hora es correcta, o ajústela y confirme.

* Visite www.OneTouch.es para saber más sobre la App Móvil OneTouch Reveal® y ver si está disponible en su país.

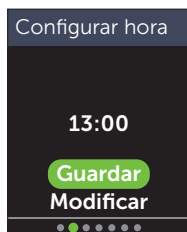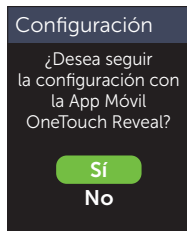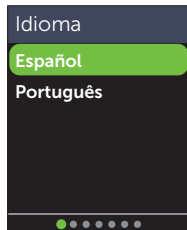

Configurar fecha

Pulse si la fecha es correcta, o modifíquela y confirme.

Ajustar los límites del intervalo objetivo a la hora de comer

Pulse si los límites intervalo objetivo preestablecidos de Antes de comer y de Después de comer son correctos o modifíquelos y confirme.




Ajustar Control del número de Análisis

Pulse si el objetivo preestablecido es correcto, en caso contrario, modifíquelo y confirme.

Establecer el Objetivo Promedio 90 días

Pulse si el Objetivo Promedio 90 días es correcto o modifíquelo y confirme.

NOTA: Asegúrese de hablar con su profesional sanitario sobre los límites de intervalo objetivo, el Objetivo del número de Análisis diario y el Objetivo Promedio 90 días adecuados para usted.

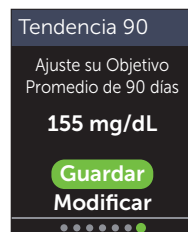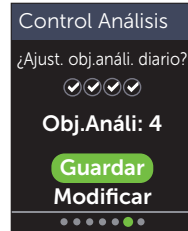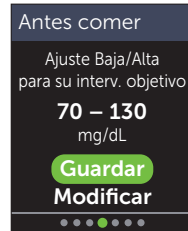

2 Realizar un análisis


Lávese las manos con jabón y agua tibia, y enjuágueselas y séqueselas antes de tomar una muestra. Quite la cápsula del dispositivo de punción y a continuación, introduzca una lanceta estéril. Gire la cubierta protectora. Vuelva a colocar la cápsula en el dispositivo.

Introduzca una tira reactiva (con la parte dorada y las 2 pestañas plateadas orientadas hacia usted) para encender el medidor.


Regule la profundidad de punción del dispositivo de punción. Cargue el dispositivo de punción y sosténgalo firmemente contra la parte lateral del dedo. Pulse el botón de disparo. Apriete suavemente el dedo para obtener una gota redonda de sangre.

Aplique la muestra de sangre en el canal en uno de los dos lados de la tira reactiva.


Cuando el canal se llene, se volverá rojo y su resultado aparecerá en unos 5 segundos.

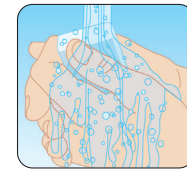


Pestañas plateadas

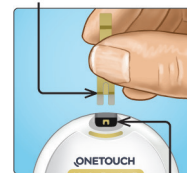

Puerto para la tira reactiva

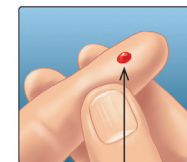

Tamaño aproximado

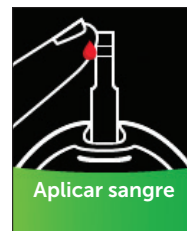


Aplicar sangre

3 Ver su resultado

Indicador Dinámico ColourSure®

El Indicador Dinámico ColourSure® le avisa instantáneamente si su resultado está por debajo (azul), dentro (verde) o por encima (rojo) de los límites del intervalo objetivo. También muestra cuándo su resultado está cerca del límite superior o inferior de su intervalo objetivo. Una nota de texto o un emoji señala un segmento de la Barra de Color.


Ejemplos de Resultados

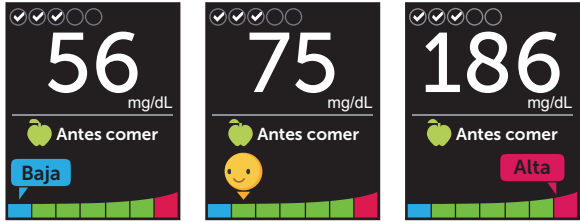

Por debajo del intervalo objetivo Próximo al límite bajo del intervalo objetivo Por encima del intervalo objetivo

Marcación de Comidas y Eventos


Un marcador Antes de comer (🍏) se aplicará automáticamente a su resultado. Puede cambiar el marcador de comida a Después de comer (🍷) y añadir un marcador de Evento.

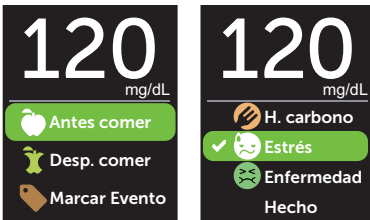

Mensajes del Mentor de Glucosa en Sangre (Blood Sugar Mentor™)

El Mentor de Glucosa en Sangre (Blood Sugar Mentor™) proporciona información sobre cómo lo está haciendo y ofrece asesoramiento para controlar la diabetes, incluidos mensajes educativos y motivacionales, basados en sus resultados de glucosa actuales y anteriores, y otros datos de seguimiento.

Ejemplos de mensajes del Mentor de Glucosa en Sangre (Blood Sugar Mentor™)

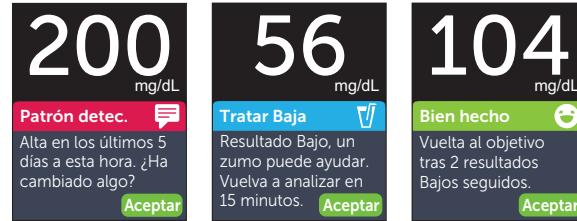


Información Orientación Motivación

El nombre de la marca **Bluetooth®** y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de LifeScan Scotland Ltd. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

4 Conectarse a un dispositivo móvil

La tecnología **Bluetooth®** le permite enviar sus resultados inalámbricamente a un dispositivo móvil, donde puede usar la App Móvil OneTouch Reveal® para revisar y ver sus resultados en gráficos, establecer Objetivos del número de Análisis diarios, consultar los mensajes del Mentor de Glucosa en Sangre (Blood Sugar Mentor™) e identificar mejor los patrones.

En el menú Configuración, seleccione **Bluetooth** y pulse (OK).

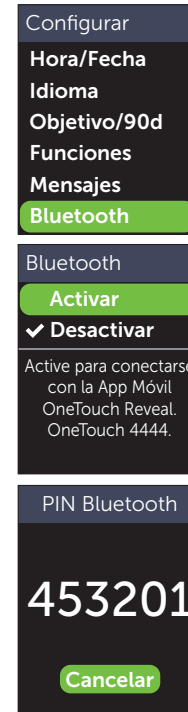

✓ indica si **Bluetooth®** está actualmente activado o desactivado.

Pulse (↶) o (↷) para activar **Bluetooth®** y pulse (OK).

Cuando se lo solicite su dispositivo móvil, introduzca el PIN que se muestra.

Ejemplo de PIN

Registre su medidor para obtener ayuda y asistencia técnica: OneTouch.es/bienvenido



ONETOUCH Verio Reflect®

Sistema para la Monitorización de Glucosa en Sangre

Guía rápida de uso



AW 07198502A